

# INSTRUCTIE BAXJECT II HI-FLOW

## Vorbereiding

- Laat de flacons op kamertemperatuur komen (15-20°C).
- Was uw handen en trek evt. handschoenen aan.
- Verwijder de kapjes van de flacons.
- Desinfecteer de rubberen stoppen met een alcoholdoekje en laat ze drogen.



## Stap 1: bevestig de waterflacon

**A**

Open de BAXJECT II Hi-Flow door de beschermfolie van de verpakking te verwijderen zonder de binnenzijde aan te raken.

- Verwijder het systeem **NIET** uit de verpakking.

**B**

Injectieflacon met wit poeder

Injectieflacon met water

- Zet de injectieflacon met water op een vlakke ondergrond.
- Draai de verpakking om en druk de BAXJECT II Hi-Flow in één beweging over de injectieflacon met water.
- De doorzichtige spike prikt nu door de rubberen stop van de injectieflacon heen.

## Stap 2: bevestig de poederflacon

**C**

Verwijder de verpakking (zonder de BAXJECT II Hi-Flow aan te raken) terwijl de BAXJECT II Hi-Flow bevestigd blijft aan de waterflacon.

- Het blauwe beschermkapje **NIET** verwijderen.
- Raak de paarse spike **NIET** aan.

**D**

- Als het water zich juist verplaatst, ga door met stap E.
- Als het water zich niet juist verplaatst, volg de herstel instructies op de achterzijde.

N.B. Het is niet erg als een kleine hoeveelheid water achterblijft.

Zet de injectieflacon met poeder op een vlakke ondergrond. Draai het systeem om, zodat de injectieflacon met water zich aan de bovenzijde bevindt. Druk de paarse zijde van de BAXJECT II Hi-Flow loodrecht over de injectieflacon met poeder. De paarse spike prikt door de rubberen stop van de injectieflacon heen. Het water verplaatst zich nu naar de injectieflacon met poeder.

**E**

Zwenk het systeem enkele malen totdat het poeder volledig opgelost is. **Niet schudden.**

## Stap 3: de oplossing optrekken

**F**

Zorg dat u een Luer-lock injectiespuit gebruikt. Verwijder het blauwe beschermkapje van het systeem. Verwijder het beschermkapje van de injectiespuit (indien aanwezig). Schroef de injectiespuit met volledig ingedrukte stamper op het systeem. **Geen lucht injecteren.**

Indien per ongeluk lucht in het systeem komt, ga naar **Scenario C** op de andere zijde.

**G**

Draai het systeem om, zodat de injectieflacon met oplossing zich aan de bovenzijde bevindt. Trek de gehele hoeveelheid oplossing op in de injectiespuit door **LANGZAAM** de stamper uit te trekken.

Schroef de injectiespuit los. Als per ongeluk lucht in het systeem is gekomen, kan een aanzienlijk deel van de oplossing teruglopen in de injectieflacon. Indien dit gebeurt en niet de gehele oplossing opgetrokken kan worden, ga naar **Scenario C** op de andere zijde.

De BAXJECT II Hi-Flow is bedoeld voor eenmalig gebruik. Bij het aanbreken van een nieuwe injectieflacon met poeder moet u daarom ook een nieuwe BAXJECT II Hi-Flow gebruiken. Als u een grotere hoeveelheid FEIBA nodig heeft dan in één injectieflacon zit, ga dan als volgt te werk:

- Los de benodigde flacons op zoals beschreven staat in de stappen A tot en met E. Gebruik bij elke injectieflacon altijd een nieuwe BAXJECT II Hi-Flow.

- Gebruik één grote injectiespuit om de verschillende injectieflacons achtereenvolgens op te zuigen.

Volg de stappen F en G voor elke gemaakte oplossing. Het gebruikte BAXJECT II Hi-Flow systeem volgens uw lokale vereisten weggooien.


Gebruik de BAXJECT II Hi-Flow niet als de verpakking niet meer steriel afgesloten is of als het tekenen vertoont van verval.

Lees aandachtig de bijsluiter door alvorens het geneesmiddel toe te dienen.


# HERSTELINSTRUCTIE BAXJECT II HI-FLOW

Herstelinstructie: als het water zich NIET naar de injectieflacon met poeder verplaatst.


- 1 Zorg dat de injectieflacon met water zich aan de onderzijde bevindt.
- 2 Kijk waar het **paarse** en het **doorzichtige** deel van de BAXJECT II Hi-Flow zit.
- 3 Bepaal welke zijde van het systeem op de waterflacon aangesloten is.
  - ✓ Als de **waterflacon correct** aangesloten is op de **doorzichtige** zijde, ga naar **Scenario A**
  - ✗ Als de **waterflacon incorrect** aangesloten is op de **paarse** zijde, ga naar **Scenario B**

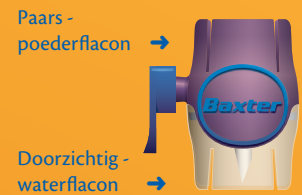

## Scenario A

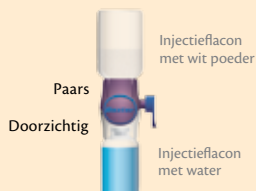

De waterflacon is **correct** verbonden met de **doorzichtige** zijde van de BAXJECT II Hi-Flow.

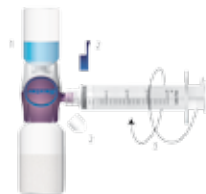

Draai het systeem om, zodat de flacon met water zich aan de bovenzijde bevindt. Zorg ervoor dat u een Luer-lock injectiespuit gebruikt. Verwijder het beschermkapje van de injectiespuit en het systeem. Verbind de spuit met het systeem.




Trek langzaam aan de stamper om lucht uit de flacons te trekken (hierdoor zal het water in de poederflacon stromen).



Verwijder de injectiespuit van de BAXJECT II Hi-Flow. Duw de stamper volledig in om de lucht uit de spuit te verwijderen. Sluit de injectiespuit opnieuw aan. **Geen lucht injecteren.**




Zwenk voorzichtig tot het poeder volledig opgelost is. **Niet schudden.**

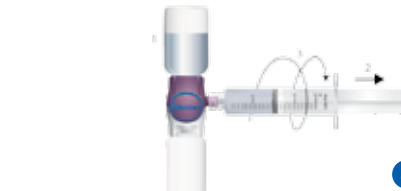

Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich aan de bovenzijde bevindt. Trek de gehele hoeveelheid oplossing op in de injectiespuit door de stamper **LANGZAAM** uit te trekken. Schroef de injectiespuit los.


## Scenario B

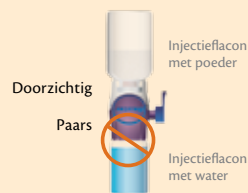


De waterflacon is **incorrect** verbonden met de **paarse** zijde van de BAXJECT II Hi-Flow.




Houd de waterflacon aan de onderzijde. Zorg ervoor dat er een Luer-lock injectiespuit gebruikt wordt. Verwijder de beschermkapjes van de injectiespuit en het systeem. Verbind de spuit met het systeem. Trek zachtjes aan de stamper om lucht uit de flacons te trekken.

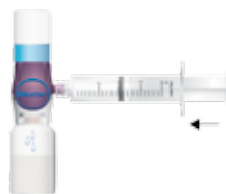

Draai het systeem om, zodat de flacon met water zich aan de bovenzijde bevindt. Duw de stamper **LANGZAAM** in om lucht in de flacons te spuiten (dit dwingt het water in de onderste flacon). Zwenk voorzichtig tot het poeder volledig opgelost is. **Niet schudden.**

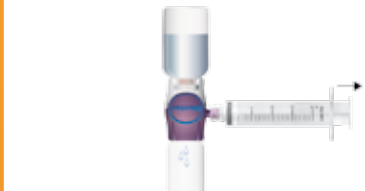

Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich aan de bovenzijde bevindt. Trek **LANGZAAM** aan de stamper om lucht uit de flacons te trekken (hierdoor zal de oplossing in de onderste flacon stromen).

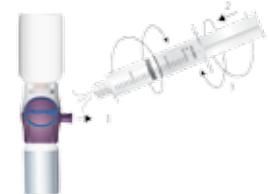

Verwijder de injectiespuit. Duw de stamper volledig in om de lucht uit de spuit te verwijderen. Sluit de injectiespuit opnieuw aan. **Geen lucht injecteren.**



Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich aan de bovenzijde bevindt. Trek de gehele hoeveelheid oplossing op in de injectiespuit door de stamper **LANGZAAM** uit te trekken. Schroef de injectiespuit los.

Herstelinstructie: als er lucht in het systeem geïnjecteerd is en niet de gehele oplossing opgetrokken kan worden.

## Scenario C

U hebt per ongeluk lucht in de flacons geïnjecteerd. Een aanzienlijke hoeveelheid oplossing is teruggelopen in de waterflacon.

Draai het systeem om, zodat de waterflacon zich aan de bovenzijde bevindt.

Volg nu uit **Scenario A** de stappen **5**, **6** en **8**