

Acceptatie van monsters HLA laboratorium

Acceptatie van monsters HLA laboratorium

Redenen voor afwijzing van een monster.

Criteria voor monsterafwijzing zijn afhankelijk van individuele tests. Over het algemeen worden monsters door het laboratorium niet weggegooid totdat de aanvrager hier van op de hoogte is gesteld.

Gebeurtenissen die kunnen leiden tot de afwijzing van een monster kunnen zijn een verkeerde of afwezige etikettering, een onjuist verzameld monster (of verdacht van besmetting) en/of hemolyse, lipemie, volume onvoldoende voor de bepaling, contaminatie aan de buitenzijde.

A. Alle monsters moeten voldoen aan bovenstaande eisen voordat zij door het HLA Laboratorium kunnen worden geaccepteerd. Als u vragen heeft over eisen voor bepaalde tests, raadpleeg dan uw laboratoriumhandleiding of bel het HLA Laboratorium op telefoonnummer 088-7557671.

B. Als het monster niet voldoet aan de bovenstaande eisen zal de aanvrager worden gecontacteerd om het probleem te bespreken. De volgende criteria zullen worden gebruikt om uit te leggen wat nodig is om het probleem te verhelpen:

- Monsters die opgestuurd zijn in een onjuiste buis kunnen niet worden aanvaard. De aanvrager zal worden gevraagd om het monster opnieuw af te nemen in de juiste buis.
- Monsters niet vergezeld van een correcte aanvraag kunnen niet worden aanvaard. Een correct ingevulde aanvraag moet worden ingediend.
- Ongelabelde buizen kunnen niet worden aanvaard. De aanvrager wordt geacht het monster aan te leveren in een goed geëtiketteerde buis.
- Lekkende buizen kunnen niet worden aanvaard. De aanvrager zal worden gevraagd om een nieuw monster in te sturen in de juiste buis, met een nieuw aanvraagformulier indien vervuild.
- Vervuilde aanvraagformulieren (exemplaren die vuil of nat zijn door fixatief, bloed of andere vloeistoffen) kunnen niet verwerkt worden. De aanvrager zal op de hoogte gesteld worden en verzocht worden om een schoon aanvraagformulier in te sturen.
- Monsters in spuitjes met naalden kunnen niet worden aanvaard. Naalden dienen verwijderd te worden en spuitjes afgedopt vóór levering aan het Laboratorium.
- Andere voorwaarden voor niet-aanvaarding omvatten: onvoldoende hoeveelheid buizen ontvangen, en/of onjuiste opslag.
- Aanvragen zonder de vereiste gegevens van de aanvrager zullen pas verwerkt worden wanneer deze gegevens aangeleverd zijn.

C. Bij afwijkingen of afwijzing van materiaal moet er een HLA opmerking toegevoegd worden aan de order in GLIMS. Daarin moet vermeld worden dat het materiaal een afwijking heeft of is afgewezen.